



Recoltor steril 30ml 1 gr EUROMED

Recoltor steril pentru urina cu o capacitate de 30 ml.

Reguli pentru recoltarea probelor de urina:

Folositi exclusiv recipienti speciali, sigilati, de unica utilizare.

Efectuati recoltarea din prima urina a diminetii.

In cazul uroculturii, recoltarea trebuie facuta dimineata, din prima urina a zilei, dupa toaleta prealabil a zonei genitale; incepeti recoltarea urinei dupa eliminarea unui prim jet.

Se aduce la laborator in maximum 2h de la recoltare. Daca timpul se prelungeste proba de urina se pastreaza la frigider.

Nu atingeti partea interioara a recipientului sau capacului! Astfel contaminati proba.