

Test de sarcina one test-caseta 1 gr ONEDIA



Nivelul hCG din urina creste rapid, putand fi detectat dupa 7 zile de la concepere, concentratia lui continuand sa creasca pana la 100 ml U/ml in prima zi a lipsei ciclului menstrual, atingand valori maxime de pana la 200.000 m U/ml dupa 10 - 12 saptamani. Prezenta hormonului hCG in urina dupa scurt timp de la conceperea si cresterea sa rapida in concentratie o face sa fie un indicator ideal pentru detectarea si confirmarea timpurie a sarcinii. Acest test rapid de diagnosticare a sarcinii detecteaza prezenta hCG in probele de urina, calitativ, la concentratii mici de numai 20ml U/ml in

mai putin de 5 minute, in orice perioada a zilei. Cea mai mare concentratie a hormonului hCG poate fi detectata intr-o proba de urina colectata dimineata.

Utilizare:

Colecteaza urina intr-un vas curat si uscat si incepe efectuarea testului. Folosind pipeta, colecteaza din recipient urina, apoi pune 3-4 picaturi in compartimentul de test (S).

Citeste rezultatul dupa 5 minute, dar nu-l interpreta mai tarziu de 10 minute. Testul poate fi facut in orice perioada a zilei.

Daca rezultatul este invalid repeta testul dupa 24 de ore.

Nivelul hormonului HCG poate fi depistat dupa 7 zile de la concepere, concentratia acestuia continuand sa creasca pana la 100 mlU/ml in prima zi a lipsei ciclului menstrual, acest test putand detecta in urina concentratii mici de numai 20mlU/ml. Rezultatul testului trebuie corelat cu un control la medicul de specialitate.

Precautii speciale:

Nu desface testul inainte de a-l folosi!

Nu lasa la indemana copiilor!

A se pastra la temperatura camerei (+18 +30i½ C).

Citeste cu atentie prospectul inainte de utilizare.