

Test de menopauza banda 1 gr BARZA

Descriere



Creșterea nivelului FSH (hormonul foliculostimulant) este asociată cu reducerea nivelului de estrogeni și instalarea menopauzei la femei. De obicei, pe măsură ce femeia se apropie de vârsta menopauzei, nivelul de FSH crește de până la zece ori față de nivelurile normale.

CÂND AR TREBUI SĂ FOLOSIȚI TESTUL DE MENOPAUZĂ?

Perimenopauza este perioada de tranziție între perioada fertilă și menopauză, în care apar primele semne ale modificării funcției ovariene. Simptomele de perimenopauză variază de la femeie la femeie, dar cele mai comune sunt bufeurile, insomnia, ciclurile neregulate, schimbările bruște de dispoziție și oboseala.

Aceste modificări ale funcției ovariene sunt lente și pot începe cu doi până la zece ani înainte de instalarea menopauzei. Testați-vă la fiecare 6-12 luni, începând cu vârsta de 35 de ani sau atunci când apar primele simptome de perimenopauză și discutați rezultatele testelor cu medicul dumneavoastră.

Cum se utilizează?

Colectați urina într-un recipient curat și uscat. Introduceți testul în urină cu vârful săgeții în jos, până la linia marcată cu MAX, timp de 3 secunde.

Așezați testul pe o suprafață plană și așteptați 10 minute afișarea rezultatului. Rezultatul citit după 15 minute nu va fi considerat corect.

Citește rezultatul

REZULTATUL ESTE NEGATIV

Apariția unei singure linii roz în zona de control (C) indică un rezultat negativ.

REZULTATUL ESTE POZITIV

Dacă pe test au apărut două linii și linia de test (T) este la fel de colorată, ori mai închisă la culoare decât linia de control (C). Acest rezultat indică prezența FSH în urină la un nivel de peste 25 mIU/ml. În acest caz, este recomandată efectuarea unui al doilea test după 5-7 zile (de preferat la aceeași oră), pentru confirmarea rezultatului. Dacă nivelul FSH rămâne ridicat pe toată durata ciclului menstrual, sunteți la perimenopauză.