

Test de sarcina ultrasensibil banda 1 gr BARZA



Testul de sarcina Barza Ultrasensibil BANDA este un test rapid care depisteaza prezenta hormonului hCG (gonadotropina corionica umana) in urina, inca din primele zile ale sarcinii. Testul poate fi utilizat cu 5 zile inainte de data probabila a urmatoarei menstruatiei*, in orice moment al zilei.

Află cu 5 zile mai devreme

Cutia contine 1 test tip banda

Acuratete >99%

Rezultat in 3 minute

In orice moment al zilei

Cum se utilizeaza?

Testul poate fi utilizat cu 5 zile inainte de data probabila a urmatoarei menstruatiei, in orice moment al zilei, insa tineti cont ca prima urina de dimineata contine cel mai ridicat nivel de hCG. Cu ajutorul Testului de sarcina Barza Ultrasensibil poate fi depistata si sarcina extrauterina.

Colectati urina intr-un recipient curat si uscat. Introduceti testul in urina cu varful sagetii in jos, pana la linia marcata cu MAX, timp de 3 secunde.

Asezati testul pe o suprafata plana si asteptati 3 minute afisarea rezultatului. Rezultatul citit dupa 5 minute nu va fi considerat corect.

Cum se citeste rezultatul?

NU SUNTETI INSARCINATA

Aparitia unei singure linii roz in zona de control (C) indica un rezultat negativ.

SUNTETI INSARCINATA

Aparitia a doua linii roz, o linie in zona de control (C) si o linie in zona de testare (T), indica

un rezultat pozitiv.

TESTUL NU ESTE VALID

Daca in 5 minute nu apare nici o linie in zona de control (C), sau apare doar linia din zona de test (T), testul nu este valid.