



## **Test veneris infectie urinara 2 gr BARZA**

Testul Veneris pentru infectii urinare depisteaza infectia tractului urinar inferior (cistita), cat si cel superior (pielonefrita), prin masurarea celor patru parametri semnificativi din urina: leucocite, nitriti, proteine si sange.

Doua teste pentru infectie urinara si instructiuni de utilizare.

Precizie de peste 99%, aceeasi precizie ca a analizelor de laborator.

Rezultat in 1-2 minute.

Test UNISEX

### **DESCRIERE**

Infectia urinara reprezinta cea mai frecventa boala a tractului urinar: uretra, vezica urinara, ureterele si rinichii.

Pot prezenta o infectie urinara atat barbatii, cat si femeile si copiii. Majoritatea celor care sufera de infectii urinare sunt femeile, datorita uretrei scurte ce favorizeaza patrunderea germenilor. Cu toate acestea, barbatii varstnici sunt, de asemenea, afectati daca au o prostata marita care impiedica eliminarea urinei.

La persoanele sanatoase, urina este sterila (nu contine microorganisme). Una dintre cele mai bune metode de a va mentine tractul urinar sanatos, este sa va goliti complet vezica urinara, la intervale regulate.

In general, o infectie apare in uretra si apoi se poate raspandi in tractul urinar superior si pana la rinichi. Simptomele variaza considerabil: arsuri la urinare sau nevoia de a urina frecvent. De asemenea, urina poate fi tulbure si cu miros neplacut.

### **PASI DE UTILIZARE**

Colecteaza proba de urina intr-un recipient curat si uscat

Scoate testul din ambalaj fara sa atingi campurile de testare

Introdu testul cu cele 4 campuri in proba de urina

Citeste rezultatul dupa 1 minut (pentru nitriti, proteine si sange) sau 2 minute (pentru leucocite)