

## **Test ovulatie minut-banda 5/cut+test sarcina promo 1 gr VISION TRADING**

Descriere:



### Mod de utilizare test ovulatie

Testul de ovulatie va ajuta sa determinati perioada in care exista posibilitatea cea mai mare sa ramaneti insarcinata.

Hormonul LH (Hormon Luteinic) se afla permanent in urina, nivelul acestuia crescand inaintea celei mai fertile zile din luna.

Pentru planificarea sarcinii este necesar descoperirea aparitiei nivelului cel mai ridicat al LH-ului (Hormon Luteinic) si implicit momentul in care posibilitatea de ovulatie este mai mare.

### Cand incepeti testarea?

Pentru a decide cand incepeti testarea trebuie sa determinati durata normala a ciclului dvs. menstrual. Durata unui ciclu se considera incepand cu prima zi a menstruatiei pana la urmatoarea menstruatie. Notati prima zi a sangerarii ca fiind ziua 1.

Puteti efectua testul in orice perioada a zilei dar cu aproximatie la aceeasi ora in fiecare zi. Reduceti cantitatea de lichide ingerate cu 2 ore inainte de testare. Testul trebuie efectuat in fiecare zi pe o perioada de 5 zile sau pana cand nivelul LH-ului a fost detectat (testul este pozitiv).

### Procedura de testare:

Nu desfaceti testul inainte de a-l folosi!

Colectati urina dumneavoastra intr-un vas curat si uscat. Asigurati-va ca atat testul cat si mostra de urina sunt la temperatura camerei (+18 - +30° C).

Introduceti testul in vas pana la nivelul sagetilor indicatoare, timp de 15-20 secunde, apoi

asezati-l pe o suprafata plana si uscata. Cititi rezultatul dupa 5 minute, dar nu-l interpretati mai tarziu de 7 minute.

#### Contraindicatii:

Testul de Ovulatie Minut nu este indicat ca metoda contraceptiva si nu este indicata folosirea lui daca ati fost insarcinata recent, sunteti la menopauza, daca aveti sindromul ovarului polichistic sau daca luati anumite medicamente pentru fertilitate.