



## Plasturi antiherpetici 15 gr COMPEED

**Plasturele antiherpetic COMPEED® Total Care™** pentru utilizare in timpul noptii este singurul plasture antiherpetic care actioneaza pe timpul noptii datorita particulelor de Hidrocoloid -075 si substantei calmante Tanacetum PFE™. Acesta ramane fixat pe leziune, asigurand tratamentul pe toata durata noptii, in timp ce dormiti. Plasturele Antiherpetic COMPEED® Total Care™ pentru utilizare in timpul noptii asigura un plus de ingrijire, completand tratamentul pe timp de zi: • asigura tratamentul pe toata durata noptii, pentru o vindecare rapida; • calmeaza durerea, mancarimile

si umflaturile; • asigura o mai buna protectie si igiena, astfel incat leziunea sa se poata vindeca in mod optim si pe timpul noptii; • sustine procesul natural de vindecare al corpului pe durata noptii.

**Plasturele Antiherpetic COMPEED Total Care™** pentru utilizare in timpul noptii completeaza tratamentul pe timp de zi al herpesului, actionand noaptea, in timp ce dormi. • Pentru cele mai bune rezultate, este recomandata folosirea in combinatie cu plasturele antiherpetic COMPEED® de zi. • Pentru tratarea optima a leziunii, plasturele se va folosi fara intrerupere pe timpul zilei si noptii, pana la vindecarea completa a  
Aplicati plasturele inainte de culcare, dupa ce plasturele purtat pe timpul zilei se desprinde de pe piele.

- Spalati-va mainile. Asigurati-va ca pielea este curata si uscata. Nu utilizati in combinatii cu diferite creme pentru ca este posibil ca plasturele sa nu mai aiba aderenta si sa nu ofere toate beneficiile tratamentului.
- Scoateti aplicatorul din ambalaj si tineti-l de margini folosind ambele maini.
- Trageti usor de capetele aplicatorului in directia sagetilor, pana cand partea adeziva este expusa pe jumătate.
- Evitati sa atingeti partea adeziva a plasturelui.
- Presati usor partea pe jumătate expusa a plasturelui pentru a-l fixa ferm pe herpes.
- Trageti usor capatul aplicatorului inainte si inapoi pe piele cu o miscare de rotatie pana cand plasturele aluneca de pe aplicator. Puteti aplica peste plasture machiaj sau ruj.

- Daca plasturele ramane fixat si la trezire, nu este nevoie sa fie inlocuit.
- Odata ce se desprinde de pe piele, indepartati plasturele si inlocuiti-l cu plasturele antiherpetic COMPEED - Total Care™.
- Daca este nevoie sa indepartati plasturele, trageti delicat in sens paralel cu pielea herpesului. • Tratamentul leziunii trebuie inceput de indata ce apar primele semne ale unei eruptii, precum furnicaturile, mancarimea si senzatiile de arsura. • Cereti sfatul farmacistului sau medicului daca eruptia devine severa, daca apar iritatii si/sau daca eruptia dureaza neobisnuit de mult.

**Plasturele Antiherpetic COMPEED Total Care™** pentru utilizare in timpul noptii ramane fixat pe toata durata noptii, asigurand tratamentul in timp ce dormiti.

- in mod normal, nu este necesara inlocuirea plasturelui pe timpul noptii.

- Plasturele contine substanta activa Tanacetum PFE™, cunoscuta pentru proprietatile sale calmante. Substanta este obtinuta din planta Tanacetum Parthenium printr-un proces patentat de extragere a constituentilor benefici si este potrivita chiar si pielii celei mai sensibile.
- Acest platură poate fi folosit pentru tratarea herpesului de pe buze si fata. A nu se folosi in interiorul cavitatii bucale, pe tesuturile nazale sau pentru a trata herpesul genital.
- Depozitare: a se depozita la temperatura camerei. Nu necesita refrigerare.

**Plasturele** acopera rana si reduce astfel riscul contaminarii ranii. Cu toate acestea, este important sa luati urmatoarele masuri de precautie pe durata eruptiei: • Nu atingeti rana, pentru ca ati putea extinde virusul si la alte parti ale corpului sau la alte persoane. • Daca ati atins rana, spalati-va imediat pe maini. • Pe durata unei eruptii, nu va atingeti si nu va frecati ochii cu mainile. • Nu folositi la comun tacamurile, rujul, periuta de dinti, nici chiar prosopul.