



## **Plasturi pentru bataturi superficiale, medii 6 gr COMPEED**

**Compeed**, obtinut prin tehnologia hidrocoloidala, este un gel activ ce imbunatateste hidratarea.

**Platurele Compeed** actioneaza ca un al doilea strat de piele, permitand schimburile lichidiene si mentinand echilibrul normal de hidratare, prin:

- protejarea si amortizarea impotriva frecarii si presiunii;
- ameliorarea instantanee a durerii;
- hidratarea si inmuiera bataturii,ajutand la indepartarea sa;

### **Caracteristici:**

Plasturele ramane lipsit peste 24 de ore. Experienta individuala poate varia.

Inmuiati pielea scufundand picioarele in apa calduta si indepartati stratul de piele intarita cu un prosop;

Curatati si uscati pielea;

Indepartati hartia de sus, apoi pe cea de jos, evitand sa atingeti partea adeziva;

Aplicati plasturele ferm peste batatura;

Lasati plasturele lipit pana cand acesta incepe sa se desprinda singur.

Poate ramane aplicat pentru mai multe zile;

Repetati tratamentul pana cand pielea s-a vindecat complet;